

TONIMER lab:

NOSNÍ GEL 20ml

HYDRATAČNÍ, OCHRANNÝ A DEKONGESTIVNÍ

INDIKACE K POUŽITÍ

Gel s ochranným, zvlhčujícím, hydratačním a dekonjestivním účinkem, doporučovaný pro zmírnění suchosti a zánětu nosní sliznice u osob trpících nemocemi z nachlazení. Udržuje správnou rovnováhu nosního mikroprostředí, a to i v případě povrchových poranění.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si umyjte ruce. Odstraňte ochranný kryt. Pouze před prvním použitím opakovaně stiskněte, dokud přípravek nevytéká. Poté vložte trysku dávkovače do každé nosní dírky a jednou nebo dvakrát stiskněte, přičemž druhou nechte zavřenou. Jemně masírujte vnější stranu nosní dírky. Po použití dávkovač opláchněte v horké vodě a osušte.

FREKVENCE UŽÍVÁNÍ

Dospělí: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, 4-5krát denně po dobu až 30 dnů nebo podle doporučení lékaře.

Děti: 1 vstřík do každé nosní dírky, dvakrát denně po dobu až 30 dnů nebo podle doporučení lékaře.

UPOZORNĚNÍ

Pouze pro aplikaci do nosu. Nepoužívejte přípravek, pokud se zdá být poškozený. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Datum použitelnosti se vztahuje na neporušený a správně uchovávaný přípravek. Po aplikaci nasaďte uzávěr zpět na tubu. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nepoužívejte přípravek, pokud víte, že jste citliví na některou z jeho složek. V případě nežádoucích účinků, přestaňte používat, poraďte se se svým lékařem a informujte výrobce. Zabraňte kontaktu s očima; v případě potřeby je vypláchněte vodou. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Skladujte mimo dosah tepla na chladném a suchém místě s uzavřeným uzávěrem. Výrobek zlikvidujte zodpovědně.

CE 0425 



ISTITUTO GANASSINI S.p.A.

di Ricerche Biochimiche

Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy

www.ganassinicorporate.com - istituto@ganassinini.it

Distributor:

Alliance Healthcare s.r.o.

Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 10800

Praha 10 – Malešice

Tel: +420 800 310 101