

TONIMER lab:

HYPERTONIC HYPERTONIC BABY SPRAY

Sterilní hypertonický roztok mořské vody působí jako dekongestivum a ředí nosní hlen. Je určen k výplachům nosních dutin při nachlazení a ke snížení otoku nosní sliznice v akutních fázích alergické rýmy, zánětu nosních dutin a vedlejších nosních dutin.

Tonimer je praktický a jednoduchý k použití a neobsahuje žádné konzervační látky ani hnací plyny, které přicházejí do styku s obsahem, čímž se snižuje riziko vzniku nežádoucích alergických reakcí.

Zpětný ventil a nádoba izolující roztok:

- zaručuje sterilitu
- umožňuje aplikaci v jakémkoli směru
- zabrání zpětného nasátí hlenu zpět do lahvičky

Návod k použití:

1. Po sejmutí ochranného krytu mohou dospělí a děti, kteří jsou schopni samostatně používat sprej, používat Tonimer v jakékoli poloze. Nejlepší je naklonit se nad umyvadlo, hlava by měla být nakloněna do strany. Vložte rozprašovací trysku spreje do nosní



1) (obrázek 1).

2. Novorozence, kojence a malé děti položte na bok, vložte rozprašovací trysku do nosní dírk, která je ve vyšší poloze, a zatlačte na trysku. Položte dítě na druhou stranu a opakujte postup s druhou nosní dírkou (obrázek 2).



2)

3. Po použití omyjte teplou vodou a osušte rozprašovací trysku a sprej uzavřete ochranným krytem.

Způsob a frekvence používání: Každé 3-4 hodiny 2 až 3x denně po dobu 15 dní nebo na doporučení lékaře.

UPOZORNĚNÍ: V případě zasažení očí, důkladně oči vypláchněte čistou vodou. V případě vedlejších nežádoucích účinků, přestaňte používat a informujte svého lékaře. Upozornění: Nádobka pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně. Nekuřte. Nepropichujte nebo nepalte, ani po spotřebování obsahu. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte sprej k jiným účelům, než je uvedeno.

STERILE R CE 0546

ISTITUTO GANASSINI S.p.A.
di Ricerche Biochimiche
Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy
www.ganassinicorporate.com - istituto@ganassini.it

Distributor:
Alliance Healthcare s.r.o.
Podle Trati č.p. 624/7, PSČ 10800
Praha 10 – Malešice
Tel: +420 800 310 101