


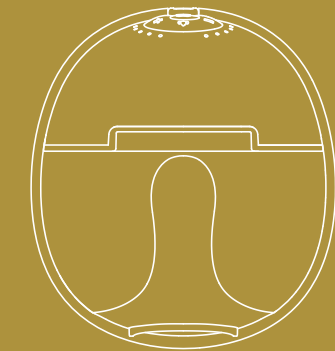

GIOmum Line Premium Warm


Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka s funkcí teplého obkladu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím odsávačky mateřského mléka si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Schéma produktu

01

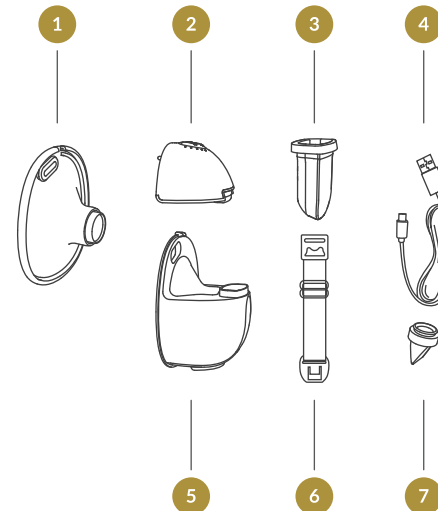


Seznam dílů:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Příruba | 4 USB nabíjecí kabel |
| 2 Motor čerpadla | 5 Sběrač mléka |
| 3 Silikonová membrána | 6 Spona pro nastavení podprsenky |
| | 7 Ventil |

Popis LED displeje a funkcí tlačítek

02

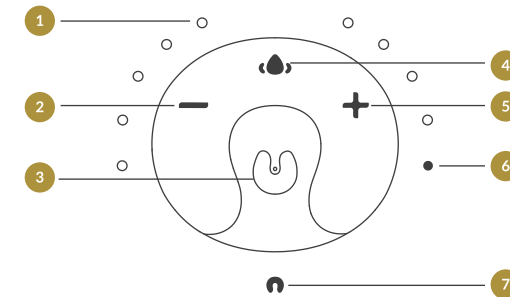

- 1 9 kontrolky odpovídá 9 úrovním intenzity (zleva doprava)
- 2 Tlačítko pro snížení úrovně
- 3 Tlačítko napájení/ výběru režimu
- 4 Tlačítko pro horký obklad
- 5 Tlačítko pro zvýšení úrovně
- 6 Indikátor teplého obkladu
- 7 Indikátor napájení

Obsah balení

- Příruba • Motor odsávačky • Silikonová membrána • Ventil
- USB nabíjecí kabel • Sběrač mléka
- Spona pro nastavení podprsenky

Montáž

03


Při montáži odsávačky postupujte podle následujících pokynů.

- UPOZORNĚNÍ** ⚠
- Odsávačku čistěte podle pokynů v této uživatelské příručce.
 - Odsávačku sestavte správně podle pokynů v této uživatelské příručce.
 - Aby nedošlo k úniku, před sestavením odstraňte zbytky materiálu kolem okraje.
 - Před sestavením čistých součástí si důkladně umyjte ruce.


1. Namontujte ventil na sběrač mléka a dávejte pozor na úhel, pod kterým je namontován.




2. Vložte silikonovou membránu do sběrače mléka a přitlačte ji rukama, aby se okraje pevně přilepily a zajistily dokonalé utěsnění.

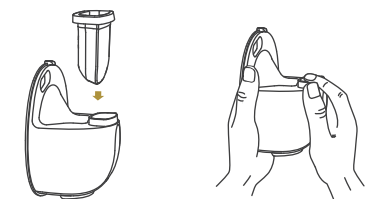

3. Při montáži příruby na sběrač mléka se ujistěte, že je odklonová drážka na přírubě vyrovnána s drážkou pro zpětný tok na sběrači mléka. Ujistěte se, že magnetický prvek na přírubě je vyrovnán se štěrbinou magnetického prvku na sběrači mléka, a poté přitlačte okraje oběma rukama, aby bylo zajištěno utěsnění.

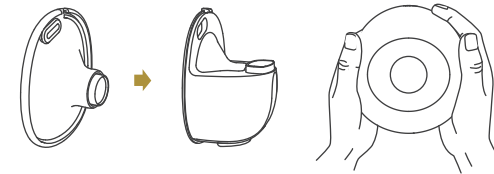

4. Namontujte hlavní část odsávačky mléka na sběrač mléka, vyrovnejte zářez pod hlavní částí se silikonovou membránou a sestavte ji směrem dolů, aby sběrač mléka správně seděl a bylo zajištěno úplné utěsnění.

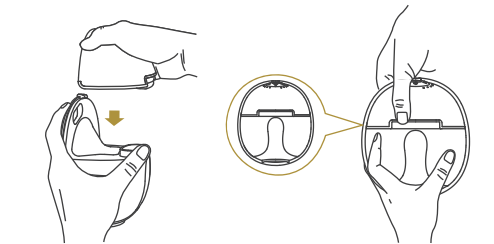


- UPOZORNĚNÍ** ⚠
- Odsávačka nefunguje během nabíjení.


Návod k odsávání

05


1. Přírubu pevně přitlačte k prsu, nechte žádné mezery a ujistěte se, že bradavky jsou ve středu. Udržujte ji ve svislé poloze. Dávejte pozor, abyste nezměnili polohu zařízení a hrudníku, jinak odsávačka nebude sát.

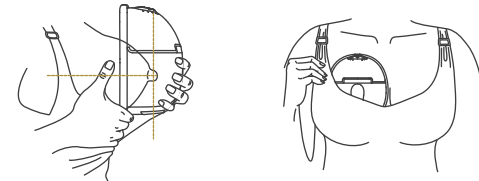


2. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení spustíte odsávačku, dokud se nerozsvítí displej.

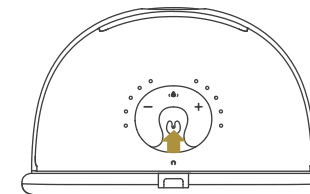


3. Krátkým stisknutím tlačítka „☺“ po zapnutí odsávačky přepínáte mezi režimy. Pomocí tohoto tlačítka můžete přepínat mezi dvěma různými režimy (režim odsávání, režim masáže). Kontrolka bliká v režimu masáže a svítí v režimu odsávání.

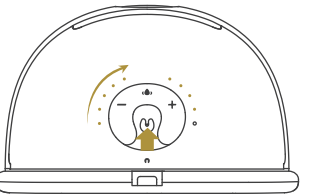

4. V každém režimu je k dispozici 9 úrovní. Každá kontrolka odpovídá jedné z 9 úrovní odsávání (zvýšování zleva doprava). Úroveň sání, která vám vyhovuje, můžete vybrat krátkým stisknutím tlačítka „+“ pro zvýšení úrovně a tlačítka „-“ pro snížení úrovně.

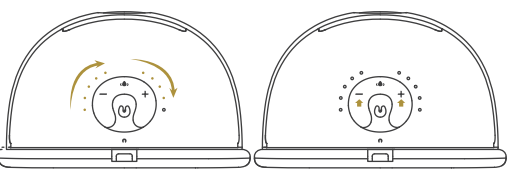

5. Krátkým stisknutím tlačítka „●●“ zapnete/ vypnete funkci teplého obkladu. Když je funkce teplého obkladu zapnutá, svítí indikátor teplého obkladu (blikání znamená, že se ohřívá, trvalé svícení znamená, že se udržuje teplota). Pokud indikátor teplého obkladu nesvítí, zkontrolujte, zda je magnetický prvek příruby vyrovnán s motorem pumpy. Pokud se indikátor „●●“ teplého obkladu po stisknutí tlačítka nerozsvítí, znamená to, že funkce je vypnutá.

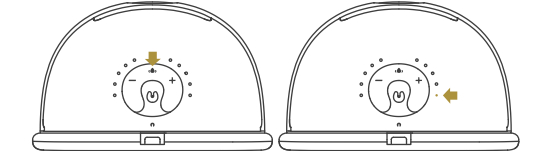


6. Dlouhým stisknutím tlačítka „☺“ vypnete odsávačku mateřského mléka.




Tipy:

1. Tento model má vestavěnou paměťovou funkci; po zapnutí zařízení se automaticky přepne do naposledy použitého masážního režimu a úrovně sání.
2. Odsávačka mateřského mléka se po 20 minutách provozu automaticky zastaví.


1. Při používání odsávačky mateřského mléka, když je zařízení plně nabité, indikátor stavu napájení svítí zeleně a zůstává zapnutý; když je úroveň napájení nízká, indikátor napájení se rozsvítí červeně. Zařízení včas nabijte.

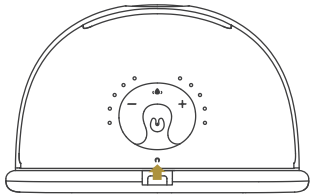

2. Zařízení nelze během nabíjení používat, v tomto okamžiku se na displeji zobrazuje pouze aktuální úroveň nabití. Během nabíjení indikátor napájení bliká červeně, zelená kontrolka bliká, když je zařízení téměř plně nabité, a po úplném nabití svítí nepřetržitě.

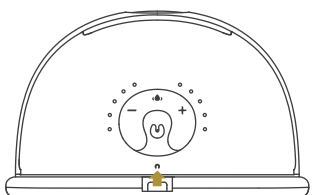

Uvolněte se a posaďte se do pohodlné židle, poté se mírně předkloňte (na opření zad použijte polštář). Dbejte na to, aby byla odsávačka a prsní košík ve svislé poloze.

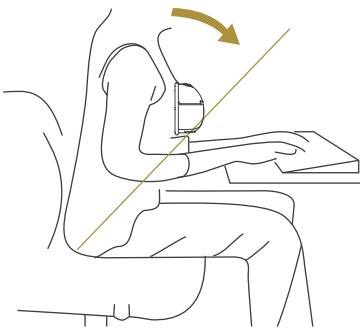

Poloha při kojení

Čištění a údržba

	První použití	Po každém použití
Těleso čerpadla	Zapněte čerpadlo stisknutím tlačítka napájení.	Podle potřeby otřete čistým, vlhkým hadříkem s 70% ethylalkoholem nebo isopropylalkoholem. Nevystavujte odsávačku vodě.
Příruba, silikonová membrána, ventil a sběrač mléka	Vařte ve vodě po dobu 5 minut. Následující části nevkładejte do mikrovlnné trouby: příruba, silikonová membrána, ventil a sběrač mléka.	Čistěte jemným prostředkem na nádobí nebo čistou vodou.


UPOZORNĚNÍ

- Při demontáži a čištění ventilu buďte opatrní; pokud dojde k poškození ventilu, odsávačka mléka nebude správně fungovat.
- Ventil očistěte jemným otřením v teplé vodě s několika kapkami čistícího prostředku. Do ventilu nevkładejte žádné předměty, které by mohly zařízení poškodit.


Ruční čištění

- Části odsávačky vložte do čisté nádoby určené výhradně pro kojenecké potřeby. Části odsávačky nevkładejte přímo do dřezu.
- Do nádoby přidejte čistící prostředek a horkou vodu.
- Části očistěte čistým kartáčem určeným výhradně pro kojenecké potřeby.
- Části opláchněte pod tekoucí vodou nebo je ponořte do čisté vody v samostatné nádobě.
- Nechte důkladně vyschnout na vzduchu. Části odsávačky, misku a kartáč na láhve položte na čistou, nepoužitou utěrku nebo papírový ubrousek na místo chráněné před nečistotami a prachem. K osušení dílů nepoužívejte utěrku.
- Vyčistěte misku a kartáč na láhve. Po každém použití je dobře opláchněte a nechte uschnout na vzduchu. Ručně je umyjte alespoň jednou za několik dní.


Nastavte délku ramínek podprsenky tak, aby bylo přisávání pohodlnější. Jeden konec nastavovací spony zavěste na vnitřní sponu kojící podprsenky. Délku podprsenky lze nastavit zavěšením spony kojící podprsenky na druhý konec nastavovací spony podprsenky.

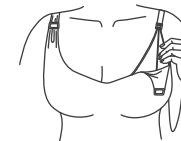

Obrázek 1

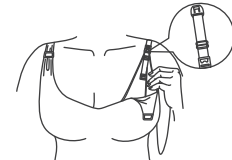


Obrázek 2

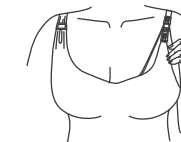


Obrázek 3

Po dokončení odsávání odstraňte odsávačku z prsu. Odsávačku držte ve svislé poloze a vyjměte motorovou část. Držte sběrnou nádobku tak, abyste mohli mateřské mléko nalít do láhve. Ujistěte se, že otvor sběrné nádoby je zarovnaný s hrdlem láhve, aby nedošlo k rozliti mateřského mléka.


1. Po dokončení odsávání stiskněte tlačítko napájení, aby se zařízení vyplo, prstem uvolněte přísavku mezi prsem a trychtýřem odsávačky a opatrně odsávačku od prsu odstraňte.

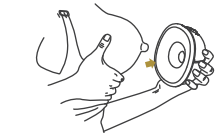

2. Oddělte láhev od motoru odsávačky, aby byla připravena k krmení/skladování. Ostatní použité části vyčistěte podle pokynů.

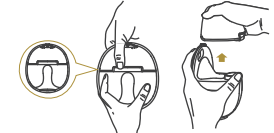

3. Nalijte mléko do láhve a ujistěte se, že je v jedné rovině s hrdlem láhve.

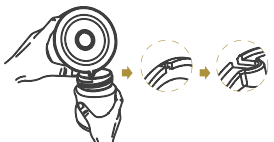

Skladování mateřského mléka

1. Skladujte pouze mateřské mléko odebrané pomocí sterilizovaných odsávaček.
2. Odebrané mléko lze uložit do čistého a sterilizovaného sáčku na skladování mléka nebo do láhve na mléko s těsnicí podložkou a ihned vložit do chladničky.

Jak skladovat mateřské mléko

1. Mateřské mléko nezmrazujte více než jednou.
2. Čerstvé mateřské mléko nemíchejte s mraženým mateřským mlékem.
3. Po krmení zbytky mateřského mléka vždy vyhodte.
4. Odsáté mléko lze skladovat v chladničce po dobu 48 hodin nebo v mrazničce po dobu až tří měsíců. Na láhev s mlékem nebo sáček na skladování mléka uveďte jasně datum a čas.

Jak rozmrazit mateřské mléko

Zmrazené mateřské mléko vložte přes noc do chladicí části ledničky, aby rozmrzlo. Pokud potřebujete zmrazené mléko použít urgentně, můžete ho rozmrazit v misce s horkou vodou. Po rozmrazení musí být mateřské mléko spotřebováno do 24 hodin.

Jak ohřát mateřské mléko

1. Vložte láhev s mlékem do misky s horkou vodou nebo ohřejte mateřské mléko bezpečně a rychle pomocí ohřívače lahví a jídla.
2. Upozornění! Před krmením dítěte zkontrolujte teplotu mateřského mléka.
3. K ohřátí mateřského mléka nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani troubu, protože by mohlo dojít ke zničení důležitých živin a protilátek.

4. Nerovnoměrné ohřátí může navíc způsobit částečné přehřátí tekutiny, což může vést k popálení.
5. Láhev na skladování mléka neponořujte do vroucí vody, aby se neporušila nebo nepraskla.

innogio

Vyrobena v Číně pro InnoGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

www.innogio.com

@innogio.official @innogio_com

