



Woman secret

Jednorázový HCG těhotenský test (proužek)
In vitro diagnostikum - pro sebetestování

„Baby“

Zakoupili jste si vysokokvalitní těhotenský test, který zjišťuje přítomnost HCG hormonu v moči pro včasné zjištění gravidity. Vysoká citlivost testu a jeho přesnost Vám při správném použití testu umožní zjistit Vaše těhotenství již 5 - 7 dnů po početí. Manipulace s testem je jednoduchá a rychlá. Test je možné použít během 24 hodin. Jednorázový těhotenský HCG test je určen pro „in vitro“ sebetestování. Pouze pro vnější použití.

Testovací sada obsahuje:

1. Testovací proužek
2. Návod k použití
3. Vysoušedlo – určeno jen k zlepšení skladovacích podmínek (Nepoužívá se !)
4. Plastová nádobka

Skladování:

Testovací sadu skladujte při teplotě (2 - 30°C) v uzavřeném obalu do data expirace. Testovací sadu chraňte před přímým slunečním zářením, vlhkostí a horkem.

Upozornění:

1. Testovací sada je určena pro použití „in vitro“ (sebetestování).
2. Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití.
3. Testovací sada je určena pro jedno použití.
4. Nepoužívejte, pokud je ochranný obal poškozen.
5. Jakmile jste ochranný obal otevřeli, testovací proužek ihned použijte.
6. Po použití testovací proužek ihned vyhoďte, aby nedošlo k případné infekci.
7. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Testování:

1. Kdy můžu test použít ?

Test je možné použít již 5-7 dnů po početí.

2. Odebrání vzorku moči

Odeberte vzorku moči do čisté nádoby. Nejvhodnější je ranní moč, kdy má hormon HCG nejvyšší koncentraci, ale můžete použít i moč z kterékoli části dne.

3. Provedení testu

1. Test aplikujte při pokojové teplotě. Otevřete ochranný obal a vjměte testovací proužek.
2. Uchopte proužek za modrý konec a opačného konce se nedotýkejte, protože by mohlo dojít ke zkreslení výsledku a ponořte ho na 10 sekund do nádoby (je součástí balení) se vzorkem moči po vyznačenou část (←MAX).
3. Proužek položte na podložku a vyčkejte, dokud se neobjeví barevné čárky. V závislosti od koncentrace HCG hormonu se výsledky mohou objevit do 40 sekund. Kompletní výsledek by měl být viditelný do 5 minut. Nikdy nezjišťujte výsledek testu po delší době jako 10 minut od aplikace vzorku moči.



Smáčecí část

Testovací část

Zde podržte

Vyhodnocení výsledku testu:

Negativní výsledek:

Když se v testovací části objeví jenom jedna čárka znamená to, že nejste těhotná. Jakmile se však menstruace nedostavila, proveďte test s novým balením.

Positivní výsledek:

Pokud se v testovací části objeví dvě čárky znamená to, že jste těhotná. HCG hormon byl detekován ve Vašem moči. Intenzita barvy testovací čárky se může měnit, co však nemá žádný vliv na pozitivní výsledek testu.

Chybný výsledek:

Pokud se neobjeví žádná čárka, test byl vykonán chybně. Test opakujte s novým balením testu.



Negativní



Positivní



Chybný

Charakteristika

1. Citlivost

Jednorázový proužkový těhotenský test zobrazí pozitivní výsledky se vzorkem moči obsahující HCG na úrovni 10 mIU/ml.

2. Přesnost

Na základě klinických laboratorních testů byla přesnost testu > 99,5% .

Upozornění

Na základě výsledků testu nečiňte žádné závěry o zdravotním dopadu zjištěných výsledků, aniž by jste tyto výsledky předem nezkonzultovali se svým lékařem.



IMPERIAL VITAMINS

Vyrobeno v SR

Distributor pro ČR: Imperial VITAMINS CZ, s.r.o.

Mlýnská 326/13, Trnítá, 602 00 Brno

www.womansecret.cz

e-mail: obchod@imperialvitamins.cz

V prodeji i další testy z řady „Woman secret“

Woman secret „RIGHT TIME“

Jednorázový LH ovulační test



Revize 30/09/2015