



Woman secret

Jednorázový HCG těhotenský test - tyčinka

In vitro diagnostikum - pro sebetestování

„Baby“

Zakoupili jste si vysokokvalitní těhotenský test, který zjišťuje přítomnost HCG hormonu v moči pro včasné zjištění gravidity. Vysoká citlivost testu a jeho přesnost Vám při správném použití testu umožní zjistit Vaše těhotenství již 5-7 dnů po početí. Manipulace s testem je jednoduchá a rychlá. Test je možné použít během 24 hodin. Jednorázový těhotenský HCG test je určen pro „in vitro“ sebetestování. Pouze pro vnější použití.

Testovací sada obsahuje:

1. Testovací tyčinku
2. Návod k použití
3. Vysoušedlo – určeno jen k zlepšení skladovacích podmínek (Nepoužívá se !)

Skladování:

Testovací sadu skladujte při teplotě (2 - 30°C) v uzavřeném obalu do data expirace. Testovací sadu chraňte před přímým slunečním zářením, vlhkostí a horkem.

Upozornění:

1. Testovací sada je určena pro použití „in vitro“ (sebetestování).
2. Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití.
3. Testovací sada je určena pro jedno použití.
4. Nepoužívejte, pokud je ochranný obal poškozen.
5. Jakmile jste ochranný obal otevřeli, testovací tyčinku ihned použijte.
6. Po použití testovací tyčinku vyhodte, aby nedošlo k případné infekci.
7. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Testování:

1. Kdy můžu test použít ?

Test možno použít již 5-7 dnů po početí.

2. Provedení testu:

1. Test aplikujte při pokojové teplotě. Před použitím vyjměte testovací tyčinku z ochranného obalu. Odstraňte barevný ochranný kryt, aby jste odkryli absorpční část tyčinky.
2. Tyčinku uchopte tak, aby absorpční část směřovala dolů. Nasměrujte absorpční část tyčinky přímo do proudu moči, dokud není důkladně mokrá (min. 10 sekund). Nepropustná fólie v testovacím okénku zabrání přímému styku s tekutinou.
3. Vzorek moči můžete odebrat i do čisté nádoby a absorpční část tyčinky tam ponořit na 10 sekund.
4. Položte testovací tyčinku na podložku a nasadte na absorpční část ochranný kryt.
5. Vyčkejte, dokud se neobjeví barevné čárky. V závislosti od koncentrace HCG hormonu se výsledky mohou objevit do 40 sekund. Kompletní výsledek by měl být viditelný do 5 minut. Nikdy nezjišťujte výsledek testu po delší době jako 10 minut od aplikace vzorku moči.

Vyhodnocení výsledku testu:

Negativní výsledek:

Když se v kontrolním okénku vedle „C“ objeví jenom jedna čárka, znamená to, že nejste těhotná. Pokud se však menstruace nedostavila, proveďte test s novým balením.

Pozitivní výsledek:

Pokud se objeví dvě barevné čárky vedle „C“ i „T“ znamená to, že jste těhotná. HCG hormon byl detekován ve Vašem moči. Intenzita barvy testovací čárky se může měnit, co však nemá žádný vliv na pozitivní výsledek testu.

Chybný výsledek:

Pokud se v kontrolním okénku neobjeví žádná čárka, test byl vykonán chybně. Test opakujte s novým balením testu.



Negativní



Pozitivní



Chybný

Charakteristika

1. Citlivost

Jednorázový proužkový těhotenský test zobrazí pozitivní výsledky se vzorkama moči obsahující HCG na úrovni 10 mIU/ml.

2. Přesnost

Na základě klinických laboratorních testů byla přesnost testu > 99,5%.

Upozornění

Na základě výsledků testu nečiňte žádné závěry o zdravotním dopadu zjištěných výsledků, aniž by jste tyto výsledky předem nekontrolovali se svým lékařem.



IMPERIAL VITAMINS

Vyrobeno v SR

Distributor pro ČR: Imperial VITAMINS CZ, s.r.o.

Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno

www.womansecret.cz

e-mail: obchod@imperialvitamins.cz



Revize 30/09/2015

V prodeji i další testy z řady „Woman secret“

Woman secret „RIGHT TIME“

Jednorázový LH ovulační test