

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Pojízdný stolek RFM

01689593 / 07748658




### Popis

Pojízdný stolek s nastavitelnou výškou a sklonem desky. Ocelový rám s nízkým podvozkem pasuje nejen k lůžkům, ale i k mnoha křeslům či židlím. 2 kolečka jsou vybavena brzdou.

### Montáž

Pojízdný stolek sestavíte snadno v několika krocích.

Obr. 1

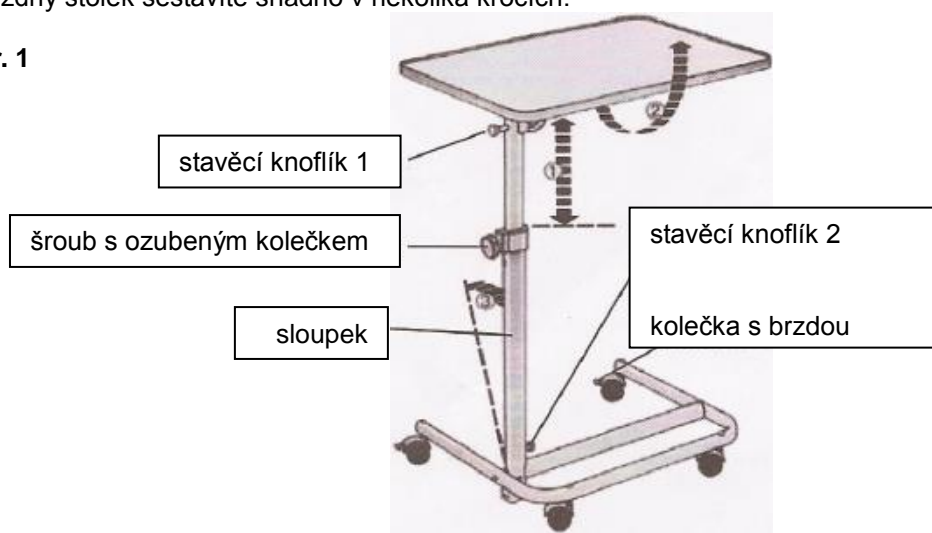

Obr. 2



Zatáhněte za stavěcí knoflík 1 nebo 2, abyste nastavili sklon desky stolku (knoflík 1) nebo sloupku (knoflík 2). Dbejte na to, aby stavěcí knoflík opět bezpečně zaskočil. Výšku desky stolku nastavíte po uvolnění šroubu s ozubeným kolečkem.

Jakmile vytáhnete desku stolku do maximální výšky, pružinové tlačítko zaskočí, k dalšímu nastavování musíte pružinové tlačítko zatlačit a současně nastavovat výšku stolku.

Dvě kolečka jsou vybavena brzdou. Sešlápnutím brzdy se kolečka zabrzdí, jejím vytažením se opět uvolní.

### Bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je šroub s ozubeným kolečkem pevně utažený.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby dobře utažené.
- Při velkém zatížení desky stolku hrozí nebezpečí převrácení. O stolek se neopírejte ani na něj nestoupejte. Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 10 kg.
- Stolek používejte pouze na rovném povrchu.
- Výšku nastavujte pouze v případě, kdy na stolku nic není.
- Po umístění stolku do požadované pozice sešlápněte brzdy a nechte je zabrzděné po celou dobu stravování či provádění jiných úkonů.
- Nikdy stolek nepoužívejte, pokud je jakkoli poškozený nebo značně opotřebovaný.

### Čištění

K čištění stolku můžete používat všechny čisticí prostředky vhodné k čištění plastových povrchů. Postupujte dle pokynů na prostředku.

K čištění nepoužívejte rozpouštědla jako aceton nebo benzín, ani žádné ostré/drsné pomůcky.

**Technické údaje**

Celková šířka:	61 cm	Nastavení výšky:	65 – 94 cm
Celková hloubka:	45 cm	Rozměr ve složeném stavu:	57 x 85 cm
Deska stolku:	62 x 41 cm	Nosnost:	10 kg
Hmotnost:	7,5 kg	Konstrukce:	ocel, plast

**Údržba/servis:**

Pravidelně kontrolujte stav stolku. S opravami se neváhejte obrátit na naše techniky.

Datum poslední revize: 02/2017

**Výrobce:**

Rehaforum MEDICAL GmbH  
Daimlerstrasse 12a  
D-25337 Elmshorn  
[www.rehaforum.com](http://www.rehaforum.com)

**DISTRIBUCE A SERVIS****MEYRA ČR s. r. o.**

Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel. (prodejna): +420 272 761 102  
tel. (servis): +420 272 661 430  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)