

Etac Immedia SupportBelt

Transportní pás s úchyty určený pro usnadnění manipulace druhou osobou.

Pás slouží jako podpora při vstávání, sedání, nácvičce chůze či přesunu pacienta. Diagonálně umístěné úchyty zajišťují lepší uchycení. Vnitřní strana pásu je z neklouzavého materiálu pro snadný a maximálně bezpečný přesun pacienta.

Pás SupportBelt je dostupný ve velikostech XXS – XL a jeho délka je nastavitelná. V závislosti na velikosti má pás 4, 6, 8 nebo 10 úchyťů. Úchyty jsou rovnoměrně rozloženy po celé délce pásu – pás je možné držet z jakékoli strany.

Technické údaje:

Velikost	Rozměry (délka x šířka)	Počet úchyťů
XXS	45 - 90 x 9 cm	4
XS	60 - 110 x 9 cm	4
S	60 - 110 x 13 cm	5
M	85 - 130 x 13 cm	6
L	110 - 160 x 13 cm	8
XL	145 - 170 x 15 cm	11

Nosnost pásu: 150 kg

Použití:

Pás nasadíte pacientovi kolem pasu nebo boků. Před zvednutím pacienta se ujistěte, že pás je dostatečně utažený a přezka správně zacvaknutá! Pás by měl být dotažen, jakmile pacient dokončí přechod od sedící do stojící pozice.

Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pás poškozený (např. prasklá přezka)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pás samostatně opravit.
- Pacienta nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Dbejte na bezpečnost jak pacienta, tak sebe/pečovatele.
- Pečující osoba nesmí nosit pás na sobě - v případě ztráty rovnováhy pacienta hrozí nebezpečí pádu obou osob.
- Při použití pásu pro nácvičce chůze si pečovatel musí být jistý, že je pacient schopný stání.
- Před prvním použitím by se pečující osoba o správném použití pomůcky měla poradit s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

Materiál: polyuretan, nylon, polypropylen, polyetylén, polyester

Čištění: pás lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky

Distribuce a servis:

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

Výrobce:

Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
etac.immedia@etac.com

