

Návod na použitie

Pozorne si prečítajte celý návod na použitie, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Mastu[®] čapíky

Na použitie pri hemoroidoch

Čo obsahujú čapíky Mastu?

Zásaditý galan bizmunity, oxid titaničitý (E171), koloidný oxid kremičitý, tuhý tuk.

Ako vyzerá Mastu a a koľko čapíkov obsahuje jedno balenie?

Jedno balenie obsahuje 10 torpédovitých, bledožltých až svetlozelených čapíkov.

Na čo sa Mastu používa?

Mastu je zdravotnícka pomôcka a používa sa na hemoroidy.

Mastu zmierňuje ťažkosti, ako sú podráždenie, svrbenie, pálenie a mokvanie, ktoré sa často prejavujú v súvislosti s ochoreniami hemoroidálneho pôvodu a podporuje hojenie rán.

Kedy a ako sa Mastu používa?

1 čapík sa 2x denne zavádza do konečníka, resp. do čreva – podľa možnosti po stolici.

Používanie Mastu nesmie presiahnuť 30 dní.

Kedy nesmiete používať Mastu?

Mastu nesmiete používať, keď ste precitlivенý (alergický) na zložky obsiahnuté v čapíkoch.

Na čo musíte dbať pred použitím a počas používania Mastu?

Pri krvácaní alebo pri podozrení na krv v stolici, ako aj pri súčasnom prejave horúčky a bolesti nesmiete používať Mastu a o ďalšom použití sa musíte poradiť so svojim lekárom.

Pokiaľ Vaše problémy s hemoroidmi pretrvávajú, poraďte sa so svojim lekárom.

Čapíky sú určené výlučne na rektálne použitie (do konečníka) a nesmú sa užívať vnútorne!

Na čo si musíte dávať pozor pri súbežnom používaní Mastu s inými prostriedkami?

Vzájomne pôsobenie s inými prostriedkami dosiaľ nie je známe. Napriek tomu však máte informovať svojho lekára alebo lekárnik, keď používate aj iné zdravotnícke pomôcky alebo lieky, alebo ste ich používali iba prednedávnom, a to aj v prípade, že išlo o voľnopredajné lieky.

Mastu nesmiete používať spolu s inými liekmi či zdravotníckymi pomôckami (napr. iné čapíky), ktoré sa zavádzajú do konečníka.

Čo musíte zohľadniť počas tehotenstva a v čase dojčenia?

Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s používaním Mastu počas tehotenstva a v čase dojčenia. Pred použitím Mastu v týchto obdobiach sa preto poraďte so svojim lekárom. Lekár zváži pomer očakávaného prínosu oproti rizikám a rozhodne o prípadnom použití Mastu.

Čo treba zohľadniť pri deťoch a mladistvých?

Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s používaním Mastu u detí a mladistvých. Pred použitím Mastu v tejto vekovej skupine sa poraďte so svojim lekárom.

Aké sú možné vedľajšie účinky?

Môžu sa vyskytnúť reakcie precitlivenosti.

Ak Vás vedľajšie účinky začnú značne obmedzovať alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ako uchovávať Mastu?

Uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Mastu po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatulke a na vnútornom obale.

Uchovávajúte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Dátum poslednej revízie textu:

August 2010

Distribúcia a informácie:

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2–18
61118 Bad Vilbel
Nemecko
www.stada.sk

Výrobca:

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Strasse 1
23562 Lübeck
Nemecko

 ⁰⁴⁸² Zdravotnícka pomôcka