

UniGel[®] APOTEX



ÚČEL POUŽITIA:

Hydrofilný gél na ošetrovanie povrchových poranení kože.

PREČO POUŽÍVAŤ UniGel[®] APOTEX NA OŠETRENIE RÁN?

- chemicky viaže kyslíkové radikály, ktoré vznikajú v priebehu procesu hojenia rán
- kryje ranu pred sekundárnou infekciou zvonka
- na rane vytvára pružnú mechanickú ochrannú vrstvu
- vytvára vhodné prostredie pre granulácie, vrátane znižovania sekrécie a zápachu rán

ZLOŽENIE:

UniGel[®] APOTEX je hydrofilný gél zložený z kopolyméru 2-hydroxyetylmetakrylátu, obsahujúceho polymérne viazané stéricky tienené amíny, makrogolu a čistenej vody (aqua purificata). **UniGel[®] APOTEX** je vyvinutý Ústavom makromolekulárnej chémie Akadémie vied ČR.

AKO POSTUPOVAŤ PRI POUŽITÍ GÉLU:

- Očistite ranu od mechanických nečistôt, napr. častíc prachu, zvyškov predchádzajúcich liečebných materiálov, ktoré by mohli následne dráždiť a poškodzovať ranu.
- Rozotrite tenkú vrstvu gélu (cca 1 mm) po celej ploche spodiny rany s miernym presahom na zdravú pokožku. Gél prilne na spodinu rany a postupne absorbuje sekréty a ďalšie tekutiny z rany.
- Ránu prekryte neprijavým materiálom (napr. masným tylom dostupným v lekární) a následne fixujte obvazom alebo gázovým štvorcem a náplastou. Drobné poranenia po nanosení gélu kryte náplastou s vankúšikom.
- Účinok gélu sa prejavuje napučaním. Unikátna technológia gélu zabraňuje prílepeniu na ranu a tým umožňuje aj veľmi ľahké odstránenie bez bolesti jemným zotretím alebo opláchnutím.
- Previazanie urobte podľa potreby po 12 - 48 hodinách. Vždy podľa stavu rany a presakovania sekundárnym krytím alebo podľa pokynov ošetrojúceho.

CIEĽOVÁ SKUPINA A OBMEDZENIE POUŽITIA:

Výrobok je určený pre dospelých pacientov.

Tehotenstvo a laktácia: Z dôvodu absencie klinických štúdií spojených s používaním u tehotných a dojčiacich žien je **UniGel[®] APOTEX** možný použiť len po konzultácii s lekárom.

Použitie u detí: Z dôvodu absencie klinických štúdií spojených s použitím u detí je **UniGel[®] APOTEX** možný použiť len po konzultácii s lekárom.

V prípade mierneho podráždenia kože (napr. mierne svrbenie alebo mierne horenie) u osôb so zvýšenou citlivosťou alebo po aplikácii v citlivých oblastiach (napr. okolo očí) zastavte liečbu a obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu vedľajších nežiadúcich účinkov (zvýšená bolestivosť, začervenanie a pod.) prerušte liečbu a kontaktujte ošetrojúceho lekára. Chráňte pred deťmi! Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte vnútorne! Nepoužívajte po uplynutí expiračnej doby uvedenej na tube. Nepoužitý prostriedok alebo prostriedok s uplynulou expiráciou vráťte do lekárne. Použitie u detí, tehotných a dojčiacich sa odporúča po konzultácii s lekárom. Výrobok na ranu aplikujte najdlhšie po dobu 30 dní. Použitie dlhšia ako 30 dní konzultujte s lekárom. Po každom použití tubu starostlivo uzatvorte.

SKLADOVANIE:

Skladujte v suchu pri teplote 15-25 °C.

BALENIE:

Tuba 5 g, 30 g, 100 g.

DISTRIBÚTOR:

APOTEX (ČR) spol. s.r.o., Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, www.apotex.cz.

VÝROBCA:

■ VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika.