



SAFECARE BIO-TECH

SAFECARE COVID-19 Ag

COVID-19 Antigen Rapid Test Device(Swab)

Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je laterální imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu z přímých nosních výtěrů nebo ze vzorků odebraných výtěrů z nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem Covid-19 během prvních sedmi dnů od nástupu příznaků.



SAFECARE COVID-19 Ag Rapid test kit


Účel použití: Detekce antigenu SARS-CoV2
Balení: 25 testů
Skladování: 4-30 °C
Typ vzorku: Výtěr z nosohltanu
Doba použitelnosti: 24 měsíců
výsledek testu: 10-15 minut

PŘÍPRAVA VZORKU A POSTUP ZKOUŠKY

<Postup testu>

Příprava extrakčního roztoku

Nosohltanový

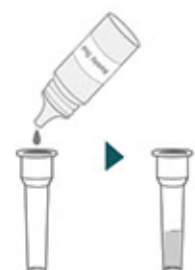

Přidejte 6 kapek extrakčního pufru do extrakční zkumavky



Odběr tamponem z nosohltanu



Odeberte vzorek od pacienta pomocí přiloženého tamponu



Promíchejte tampon s extrakčním roztokem



Nasadte víčko



Přidejte 3 kapky roztoku do jamky na kazetě testu



10-15 min



INTERPRETACE VÝSLEDKŮ



Pozitivní



Negativní



Neplatný



Výrobce: **Safecare Biotech Co., Ltd**

Distribútor pre SR: **MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.**

1.mája 220/19, 058 01 Poprad

Tel.Fax.: **+421 52 789 44 80**

Mobil: **+421 904 508 149**

email: **kurnava@mepis.sk**

www.mepis.sk